


Clinalkan

Détergent désinfectant alcalin



Description


Nettoyage et pré-désinfection par immersion directement après utilisation.

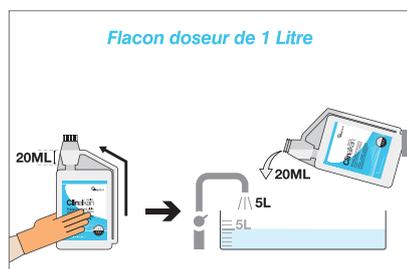


1 Presser les flancs du flacon pour obtenir une dose de 20mL. Verser 20mL pour 5L d'eau du réseau.




1 A l'aide de la pompe doseuse, diluer 20mL pour 5L d'eau.

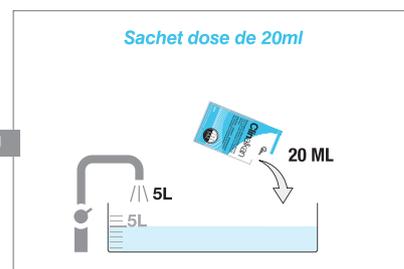


1 Verser le contenu du sachet dose pour 5L d'eau.

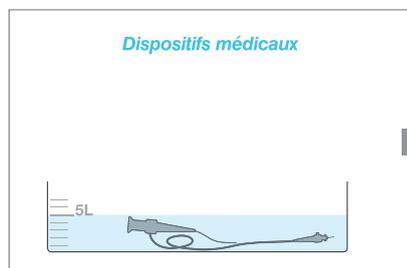

2 Immerger et irriguer les dispositifs médicaux. Temps de contact : suivant les recommandations en vigueur.

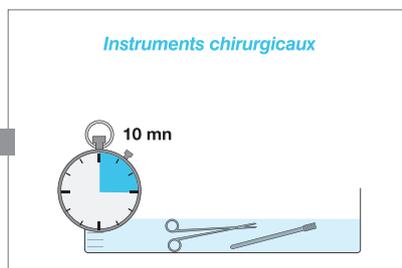

2 Immerger les instruments chirurgicaux ouverts et démontés. Temps de contact : 10 minutes.

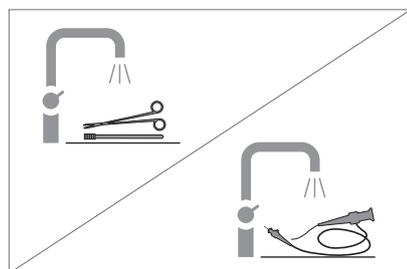

3 Rincer abondamment à l'eau du réseau.

Selon la nature du dispositif médical désinfecter ou stériliser.

- Usage sur l'instrumentation : Renouveler la solution dès qu'elle est souillée ou au plus tard toutes les 24h.
- Usage sur les dispositifs médicaux : Renouveler la solution selon les recommandations en vigueur.

Spectre d'activité

Bactéricide, levuricide, actif sur HBV, HCV, Norovirus.

Précautions d'emploi

Porter des gants et des lunettes de protection. Consulter la fiche de données de sécurité.

