

Alkacide


Désinfectant de haut niveau




Description

Désinfection par immersion après nettoyage avec ALKAZYME.


Bouteille de 250mL, 500mL

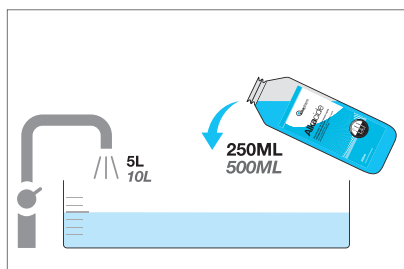

- 1 Verser la solution dans un bac de désinfection à égouttoir et à couvercle. Compléter avec le volume d'eau nécessaire.

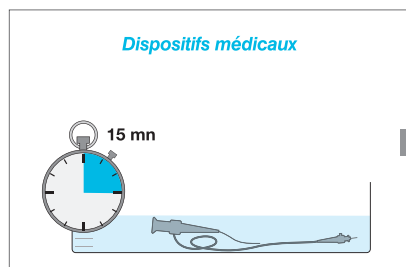


- 2 Immerger et irriguer les dispositifs médicaux. Temps de contact : 15 minutes

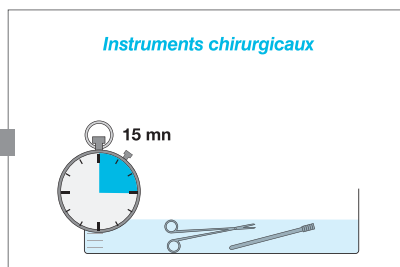

- 2 Immerger les instruments ouverts et démontés. Temps de contact : 15 minutes.



- 3 Egoutter et rincer abondamment à l'eau du réseau, filtré ou stérile selon la nature des actes auxquels le matériel est destiné.

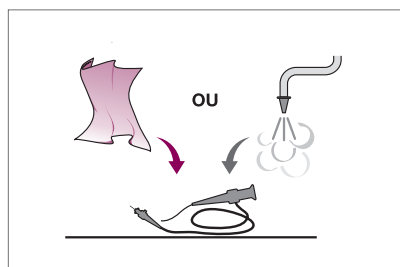

- 4 Sécher avec un textile ou par insufflation d'air médical filtré. Renouveler la préparation tous les 7 jours ou dès qu'elle est souillée.

Spectre d'activité

Bactéricide, levuricide, virucide, actif sur *Aspergillus brasiliensis* (niger), *Mycobacterium terrae*, *Mycobacterium avium*, *Bacillus subtilis* et *Bacillus cereus* après nettoyage avec ALKAZYME (0,5%, 15 mn).

Précautions d'emploi

Porter des gants et des lunettes de protection. Consulter la fiche de données de sécurité.

