

Cidalkan

Détergent Désinfectant



Pulvérisateur 1L / bidon 2L et 5L



1 Appliquer CIDALKAN directement sur la surface à traiter. Les bidons de 2L et 5L sont des recharges pour le pulvérisateur.


OU



1 Appliquer CIDALKAN sur un support non-tissé propre.



2 Nettoyer minutieusement par essuyage manuel. Laisser agir le produit 5 minutes (15min pour *C. difficile*). Ne pas rincer (sauf surfaces avec contact alimentaire).

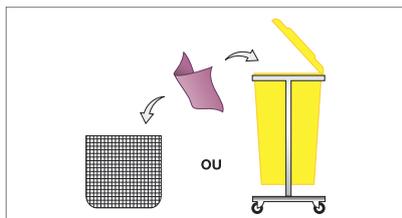

3 Jeter le support souillé ou l'évacuer dans le filet de récupération pour le linge sale. Changer de lingette pour chaque équipement ou dispositif médical.


Lingettes



1 Sortir une CIDALKAN lingette de son emballage. Bien refermer le couvercle après utilisation.



2 Nettoyer minutieusement par essuyage manuel. Laisser agir le produit 5 minutes (15min pour *C. difficile*). Ne pas rincer (sauf surfaces avec contact alimentaire).

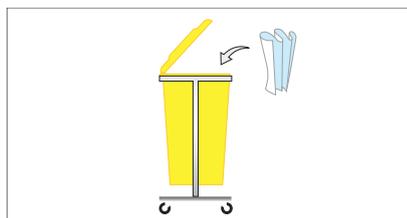

3 Jeter la lingette. Changer de lingette pour chaque équipement ou dispositif médical.

Description

Pour le nettoyage et la désinfection par essuyage humide. Usage sur les surfaces et les dispositifs médicaux non immergeables.

Spectre d'activité

Bactéricide ; levuricide ; fongicide ; actif sur Rotavirus, Norovirus, Adenovirus, HBV, HCV, VIH, Influenza A-H1N1, Herpès virus; sporicide sur *Clostridium difficile*.
Activité spécifique aux sprays : *Bacillus subtilis*.

Précautions d'emploi

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et consulter la fiche de données de sécurité. DM classe IIb.

Exceptions d'emploi

Tous les matériaux sensibles à l'alcool. Dans le cas de matériaux inconnus, faire un essai sur une petite surface.

