

KIT DE PROTECTION POUR LE PERSONNEL SOIGNANT

Sur-blouse + Manchettes*


1

ENFILER LES MANCHETTES

2 manchettes liées par une bande plastique



Retirer la partie prédécoupée au centre.
Glisser les bras dans les 2 manchettes.
Passer la bande plastique derrière la tête.

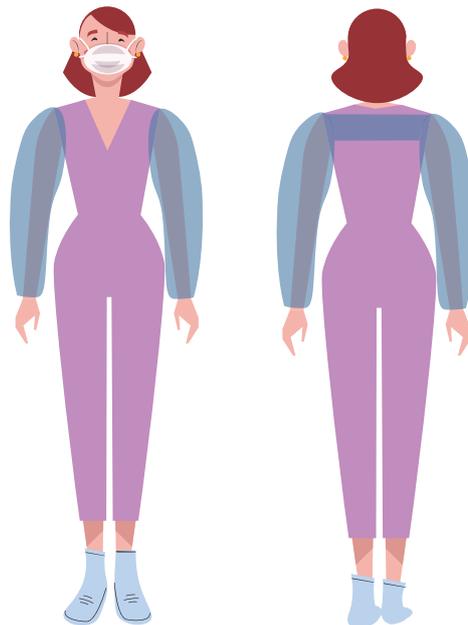


Pour les retirer :

- Déchirer la bande plastique dans le dos en tirant dessus.
- Retirer les manchettes de l'épaule vers le poignet en les retournant.

KIT DE PROTECTION POUR LE PERSONNEL SOIGNANT Sur-blouse + Manchettes*

2 ENFILER LA SUR-BLOUSE

Passer les bras dans les ouvertures puis la tête.
Ajuster la sur-blouse en couvrant bien les épaules.

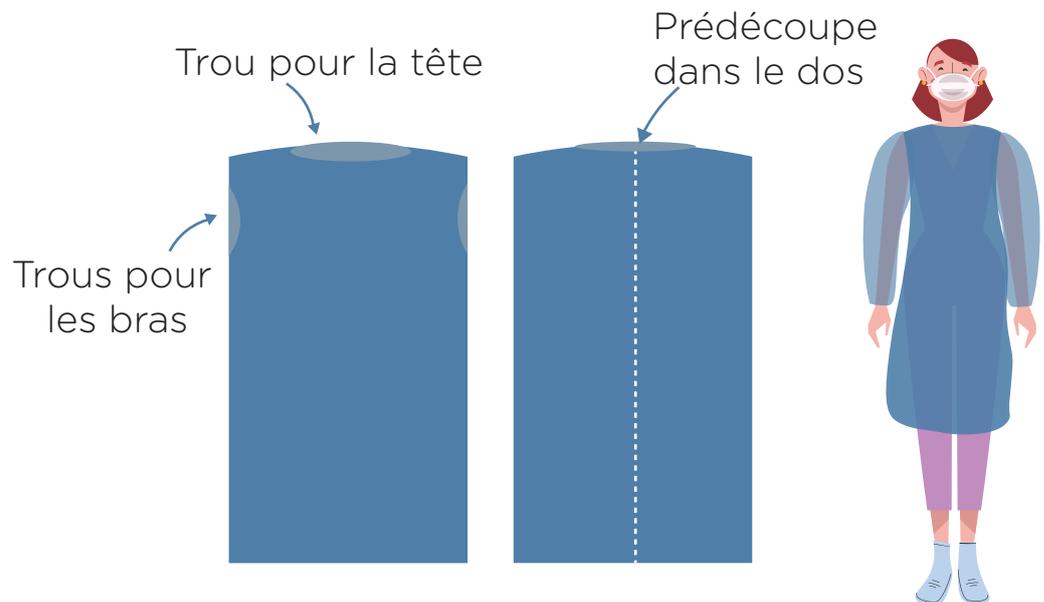

Pour retirer la sur-blouse :

- Déchirer la prédécoupe dans le haut du dos en tirant de chaque côté.
- La retirer impérativement en tirant vers l'avant et vers le bas.

