

Brochure informative : Protèges-sondes INTERGOS pour sondes d'échographie

Production : PLEASURE LATEX PRODUCTS SDN.BHD

Partia 5322, 15th Miles, Jalang Padang

Gajah, 45800 Jeram, Selangor Darul Ehsan

Malaisie tel : 603-3250 0377 ; Fax : 603-3250 3069



Obelis s.a

Boulevard Général Wahis

53, 1030 Brussels, BELGIA

Tel : +(32)2.732.59.54

E-mail : mail@obelis.net

Symbole	Signification	Symbole	Signification
	Date d'expiration		Numéro de lot
	Date de fabrication		Contient du latex de caoutchouc naturel
	Protéger de l'humidité		Ne pas utiliser si emballage endommagé
	Protéger des rayons du soleil		Lire le mode d'emploi
	Ne pas réutiliser		Fabricant
	Non stérile		

Informations pour l'utilisateur : Tout incident grave doit être signalé au fabricant/représentant agréé et à l'autorité compétente de son propre pays.

Date de publication : 30 novembre 2021 (édition 00)

Veillez lire attentivement les instructions avant utilisation :

Les utilisateurs auxquels l'article est destiné : professionnels de santé

Utilisation prévue pour :

Protection pour éviter la contamination des sondes d'échographie par les fluides corporels. Facilite le nettoyage et la désinfection des sondes.

Ne pas réutiliser en raison de l'augmentation du risque d'infection.

Mode d'emploi : Le protège-sonde est considéré comme un accessoire des systèmes d'imagerie par ultrasons (échographes). Par conséquent, pour assurer l'utilisation correcte des protèges-sondes, il est nécessaire de lire les instructions suivantes :

- Ne pas utiliser si le matériau en caoutchouc est collant, fragile ou manifestement endommagé.
- Assurez-vous que la date d'expiration ne soit pas passée.
- Ouvrez l'emballage du protège-sonde, en le déchirant doucement et avec précaution.
- Veillez à ce que la partie enroulée du protège-sonde soit à l'extérieur.
- Placez le capuchon du protège-sonde sur l'extrémité de la sonde et développez-le doucement jusqu'à la base.
- Si besoin d'hydratation, utilisez exclusivement des produits à base d'eau, ne pas utiliser de produit à base d'huile car ils peuvent endommager le protège-sonde.
- À usage unique.

Stockage : Conserver dans un endroit frais, sec et loin de la lumière.

Destruction : Jetez les protèges-sondes usagés de manière hygiénique et réfléchie. Ne pas jeter dans les toilettes.

Mise en garde :

Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel qui peut provoquer des réactions allergiques, y compris un choc anaphylactique.